

Sterilizaci ZP je možno provádět na oddělení CS pro externí zájemce pouze po sepsání smlouvy o poskytování služeb

Postup pro přípravu zdravotnického prostředku zákazníkem:

1. Mechanická očista patří mezi dekontaminační postupy, které odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů
2. Pokud došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce.
3. Při volbě postupu dezinfekce vycházejte ze znalostí cest a mechanismů přenosu infekce.
4. Chemická dezinfekce: při ředění postupujte dle návodu výrobce. Používejte dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnické prostředky, nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití ve zdravotnictví.

Dodržujte tyto zásady:

1. Dezinfekční roztoky připravte dle návodu výrobce rozpuštěním daného přípravku ve vodě, maximálně na 8-12hod.
 2. Při přípravě dezinfekčního roztoku se vychází z toho, že jejich názvy jsou slovní známky a přípravky se považují za 100%.
 3. Předměty kontaminované biologickým materiálem dezinfikujte přípravky s virucidním účinkem.
 4. Střídejte dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami z důvodu zabránění rezistence mikroorganismů.
 5. Po uplynutí doby expozice dezinfekčního prostředku opláchněte zdravotnický prostředek pod tekoucí vodou.
 6. Suchý zdravotnický prostředek vložte do dezinfikovatelného, hladkostěnného, uzavíratelného, dostatečně velkého plastového boxu.
 7. Vyplňte formulář „Žádanka na sterilizaci ZP“, vložte jej do plastové obálky umístěné na víku boxu.
 8. Infekční ZP označte červeně INFEKČNÍ na formulář „Žádanka na sterilizaci ZP“, popřípadě oznamte telefonicky na pracoviště CS.
 9. Příjem zakázek na oddělení Centrální sterilizace ve všední dny od 6.00 – 18.00 hodin
 10. Na formulář „Žádanka na sterilizaci ZP“ uveďte: datum, kdo sterilizaci požaduje, katalogový název ZP, počet kusů, zda proběhla dekontaminace, popřípadě dezinfekce a o jaký druh sterilizace žádáte (dle doporučení výrobce)
- Druhy sterilizace: P „ pára 134°C , - 7 minut
 „ G „ guma 121°C, - 20 minut
 „ F „ Formaldehyd – 75°C, - 30 minut, chemická, nízkoteplotní dezinfekce, nevhodná pro porézní materiál
11. Uvádějte začáteční písmena požadované sterilizace.
 12. ZP k jednorázovému použití neposílejte, nedají se resterilizovat.
 13. Resterilizovatelný ZP s prošlou expirací posílejte v neporušeném originálním obalu, na formulář uveďte RESTERILIZACE“

Exspirace pro sterilní materiál

Po předsterilizační přípravě, zabalení a provedení vami požadovaného druhu sterilizace, bude ZP v kombinovaném obalu (papír-folie) sterilní

Jednoduchý obal	volně ložený po dobu 6 dnů	chráněný po dobu 12 týdnů
dvojitý obal po dobu „D“	volně ložený po dobu 12 týdnů	chráněný po dobu 6 měsíců
dvojitý obal a skladovací obal „R“	volně ložený po dobu 1rok	chráněný po dobu 1 rok

Každý vysterilizovaný ZP má na obalu uvedeno: datum sterilizace, datum expirace, číslo a šarži sterilizačního přístroje, kód osoby zodpovědné za sterilizaci.

Případné reklamace přijímá vedoucí sestra pracoviště CS na tel: 583335805 do 24 hodin od převzetí zakázky.

V Šumperku dne 18.1.2024

Zpracovala: Bc. Lucie Hamanová, vedoucí sestra centrální sterilizace